

### PROPÓSITO PREVISTO

Permite la autorrecolección de muestras de sangre capilar junto con un depósito de recolección de muestras compatible que se envía a un laboratorio acreditado para su análisis.

Solo para uso en investigación. No se debe usar en procedimientos de diagnóstico.

### DESCRIPCIÓN DEL KIT

El Kit Tasso+ es un kit que incluye el dispositivo Tasso+ y todos los suministros necesarios para recoger una muestra de sangre. El dispositivo Tasso+ es un dispositivo de punción de sangre estéril y desechable. Al recolectar una muestra, el dispositivo se sujeta sobre la piel mediante un adhesivo suave. Una lanceta estéril perfora la piel con solo presionar el botón, y al mismo tiempo crea un ligero vacío que ayuda a que la sangre capilar fluya por gravedad hacia un tubo compatible. Después de un período de tiempo predefinido, o cuando el tubo está lleno, el dispositivo se retira de la piel. El tubo se retira y se tapa para su transporte. La lanceta es de un solo uso y se retrae automáticamente en el dispositivo en una posición segura después de su uso.

### CONTENIDO DEL KIT

Dispositivo de punción de sangre Tasso  
Tubo compatible, consulte la etiqueta del fabricante  
Compresa caliente  
Venda  
Hisopo con alcohol  
Bolsa de retorno con almohadilla absorbente  
Instrucciones de uso

### ELIMINACIÓN

Siga las directrices locales para desechar objetos punzocortantes usados como material de riesgo biológico.

Longitud máxima: 5 mm  
Profundidad máxima: 2 mm



¿Es la primera vez que utiliza Tasso?  
Mire nuestro video instructivo:  
[www.tassoinc.com/tassoplus-video](http://www.tassoinc.com/tassoplus-video)  
o escanee el código QR para acceder.



Póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda: 1-800-257-2370

PN0856-01.01

### ADVERTENCIAS

No está diseñado para más de un uso. No usar en más de un paciente. El uso inadecuado de lancetas sanguíneas puede aumentar el riesgo de transmisión inadvertida de patógenos transmitidos por la sangre, especialmente en entornos donde se realizan pruebas a varios pacientes.

### PRECAUCIONES

Para uso exclusivo de una sola patente Deseche todo el dispositivo después de su uso.

No lo use después de la fecha de vencimiento.

Para un solo uso, únicamente.

Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Pueden aparecer hematomas menores o marcas residuales en el sitio de recolección de muestras.

No lo vuelva a esterilizar.

Sólo para uso externo.

Úselo mientras está sentado, ya que puede producirse un desmayo con cualquier procedimiento de muestreo de sangre.

No se debe usar en los talones de los bebés.

Consulte las instrucciones del fabricante para conocer cada componente.

No lo use si la bandeja se ha abierto o dañado.

Use equipo de protección personal cuando manipule materiales biopeligrosos.

### SÍMBOLOS

**REF** Número de catálogo

**LOT** Número de lote

Fecha de caducidad

Para un solo uso, únicamente

Almacene a 18-25 °C

Transporte al 25-85% de HR

Consulte las instrucciones de uso

Este dispositivo contiene objetos punzocortantes

No lo utilice si el embalaje está dañado

**STERILE R** Esterilizado mediante irradiación

No lo vuelva a esterilizar

Tasso, Inc.  
400 2nd Ave W.  
Seattle, WA 98119 USA  
+1 800-257-2370 | [www.tassoinc.com](http://www.tassoinc.com)

Tasso



## Kit Tasso+

Instrucciones de uso

Solo para uso en investigación.  
No debe usarse en procedimientos de diagnóstico.

Suministros adicionales:

CRONÓMETRO

ESPEJO


PLUMA

NAVAJA

## 1. Prepárese



1. Lávese las manos antes de usar. Los trabajadores de la salud deben usar guantes durante la recolección.

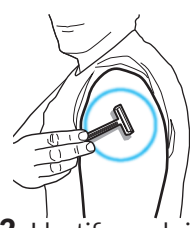

2. Identifique el sitio de recolección: para obtener mejores resultados, elimine cualquier pelo.




3. Reúna todos los artículos necesarios. Retire el dispositivo de la bandeja.



4. Gire y retire la tapa del tubo.



5. Con las líneas de llenado hacia afuera, presione el tubo en el dispositivo hasta que quede ajustado.

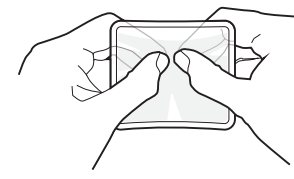

6. Siga las instrucciones de la compresa caliente para activarla. Si la compresa no se calienta, deséchela y use la mano en su lugar.



Aumente el flujo sanguíneo en el sitio de recolección



7. Frote la compresa caliente o la mano hacia arriba y hacia abajo en el hombro del usuario durante 2 minutos para calentar y aumentar el flujo sanguíneo.



8. Limpie el área con una almohadilla con alcohol y deje secar.




9. Retire la cubierta transparente del botón rojo.


## 2. Recoja





Es posible que no sienta el dispositivo. Deje actuar 5 minutos o menos si la sangre alcanza la línea de llenado.

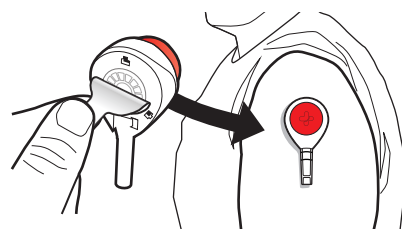


10. Despegue la lengüeta del dispositivo y péguelo en la parte superior del brazo. Deje el brazo colgando recto a su costado.

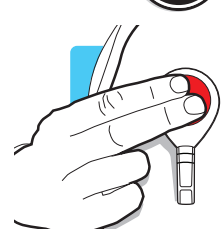


11. Presione el botón hasta el final UNA VEZ y suéltelo. Ajuste el cronómetro en 5 minutos. Observe el llenado del tubo utilizando un espejo según sea necesario.

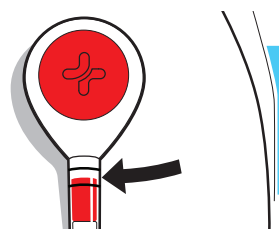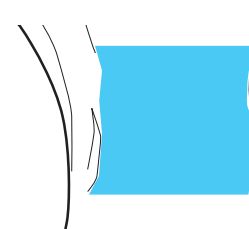


12. Es posible que la sangre no aparezca durante los primeros 1-2 minutos. Deje que el tubo se llene durante 5 minutos. Retire el dispositivo si la sangre llega a la línea superior antes de que se acabe el tiempo. ¡No llene más allá de la línea superior!

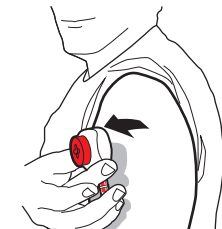

13. Retire el dispositivo despegándolo de un lado. Si es necesario, aplique el vendaje suministrado.

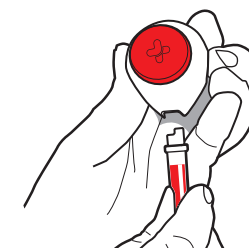

14. Quite el tubo del dispositivo con un ligero giro y tire hacia abajo.

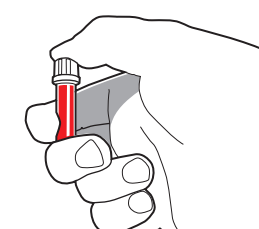


15. Encaje la tapa completamente en el tubo. Aplique la etiqueta del tubo si se proporciona.


10X




16. Invierta suavemente el tubo 10 veces para mezclar la sangre. Dé un golpecito o mueva el tubo para que la sangre se mueva. Cualquier gel en el tubo no se mezclará con la sangre.

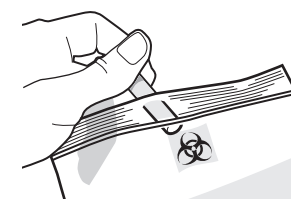

17. Coloque el tubo en una bolsa de retorno transparente y presione para sellar. No retire la almohadilla.

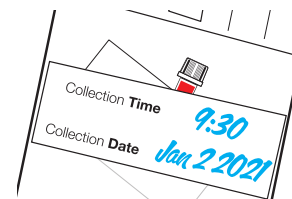


18. Registre la hora y la fecha en la etiqueta de la bolsa de devolución.

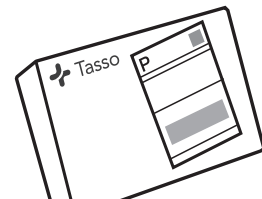

19. Siga las instrucciones proporcionadas para devolver la muestra del usuario al laboratorio.



20. Siga las directrices locales para desechar todos los materiales.

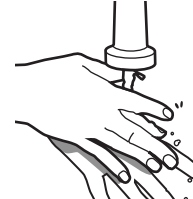

21. Lávese las manos después de su uso.